

ANALYSES SALIVAIRE Covid19 (40+40)

KIT DE PRÉLÈVEMENT

ANALYSE SALIVAIRE COVID-19

Composants du kit SANSURE et conditions de stockage (conditionnement 48 tests):


	Eléments	Conditions de stockage
Specimen Collection Swab	Coronavirus Oral Swab – capacité d’absorption salivaire > 100 µl par swab 	Température ambiante
Sample Storage Reagent	Milieu de collecte et de transport conditionné en tubes de 1mL	Température ambiante

Conditions du prélèvement :

- ⚠ *Le prélèvement doit être réalisé avec des gants non poudrés ;*
- ✓ Il est conseillé d’éviter les désinfections avec des dérivés alcooliques et de préférer l'eau de javel ou de la Chlorhexidine ;
- ✓ Il est recommandé de ne pas s'alimenter, de ne pas fumer, de ne pas se brosser les dents ou d'utiliser un bain de bouche au moins 1 heure avant le prélèvement ; Il est également recommandé de ne pas boire 20 minutes avant le prélèvement.

Réalisation du prélèvement :

- ✓ Demander au patient d’abaisser son masque pour découvrir sa bouche, puis de diriger sa langue vers le haut pour dégager l’espace sub-lingual

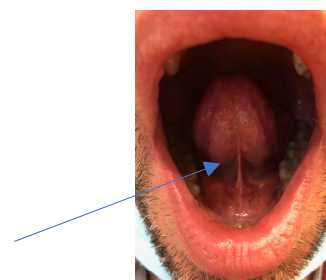

ANALYSES SALIVAIRE Covid19 (40+40)

- ✓ Introduire les 2 écouvillons dans la bouche pour les déposer dans l'espace sublingual au contact de la muqueuse, à droite et à gauche.



- ✓ Le patient referme sa bouche sur l'écouvillon qui reste en place 30 secondes.



- ✓ Demander au patient d'ouvrir légèrement la bouche puis retirer le swab après avoir effectuée 5 mouvements de rotation du swab.
- ✓ Introduire l'écouvillon dans le tube de prélèvement puis tourner 6 fois l'écouvillon tout en appuyant l'extrémité contre le fond et le côté du tube. Retirer l'écouvillon tout en appuyant sur les parois. Renouveler l'opération avec l'autre swab. Fermer correctement le tube et identifier le prélèvement de façons sûre et pérenne avec le nom, prénom, date de naissance du patient ainsi que la date et l'heure du prélèvement.

Acheminement du prélèvement :

- ✓ Il est conseillé de transmettre les prélèvements au plus vite au laboratoire d'analyses afin qu'ils soient traités sous 8h à température ambiante. Dans l'éventualité d'un délai plus important, un stockage à 2-8°C est conseillé pendant 24h.
- ✓ Pour un résultat optimal, les échantillons ne doivent pas être stockés plus de 10 jours à -20°C et les cycles de congélation / décongélation sont déconseillés